



Целевое применение:

Данное устройство используется для эндоскопического лигирования варикозных узлов в области гастроэзофагального соединения, а так же лигирования внутренних геморроидальных узлов.

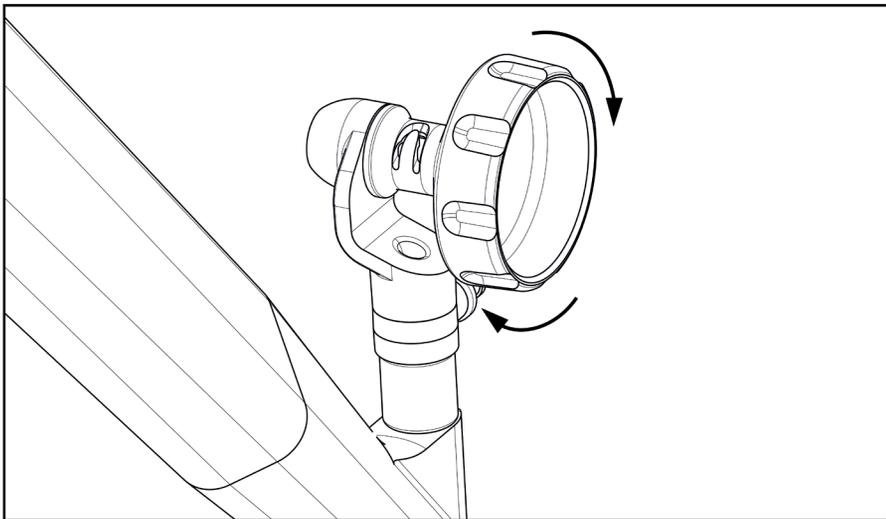


Шаг 1

Пропустите катушку для лигирования через крышку эндоскопа и рабочий канал эндоскопа.

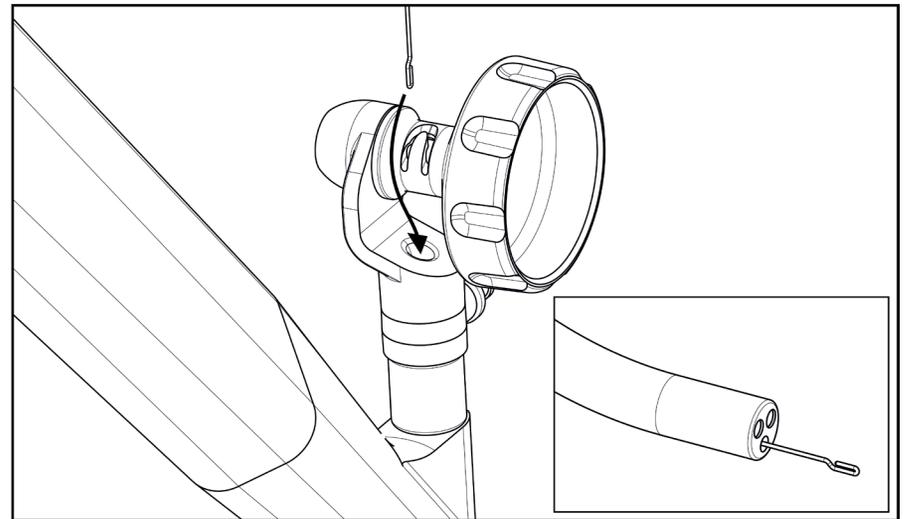


Шаг 2

Введите загрузочный трос через центр катушки продевайте до тех пор, пока конец троса не выйдет из эндоскопа. **Важно:** Любой конец троса можно вставлять в рабочий канал.

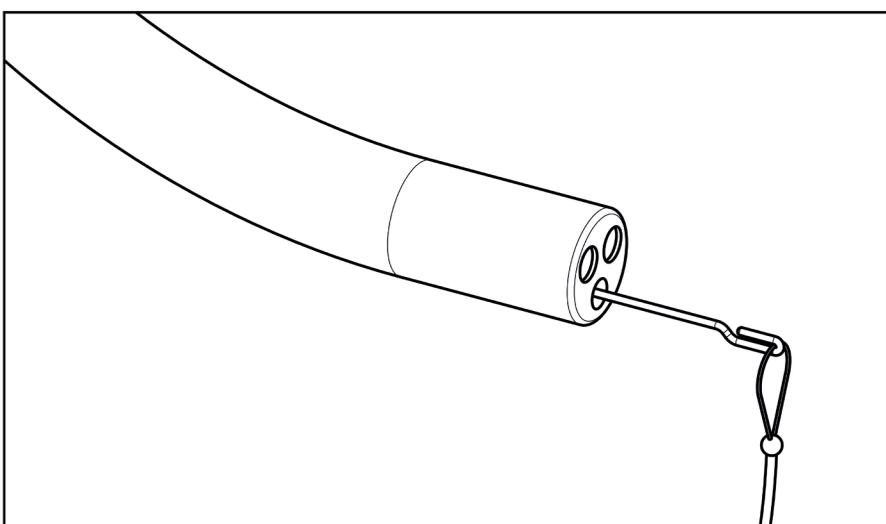


Шаг 3

Зацепите спусковую нить за крючок загрузочного троса. Проденьте загрузочный трос со спусковой нитью через эндоскоп и катушку лигатора.

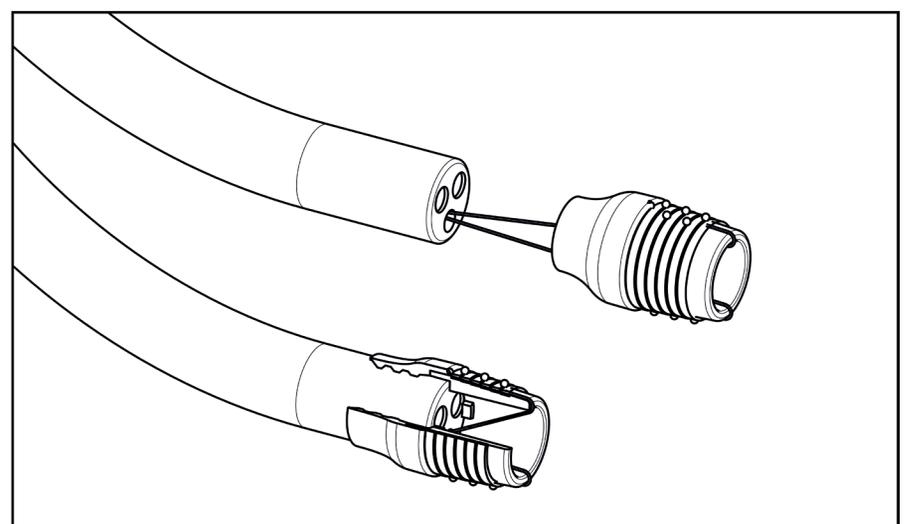


Шаг 4

Установите цилиндр на конец эндоскопа и двигайте его до упора. **Важно:** Избегайте сцепления спусковой нити с цилиндром и эндоскопом.

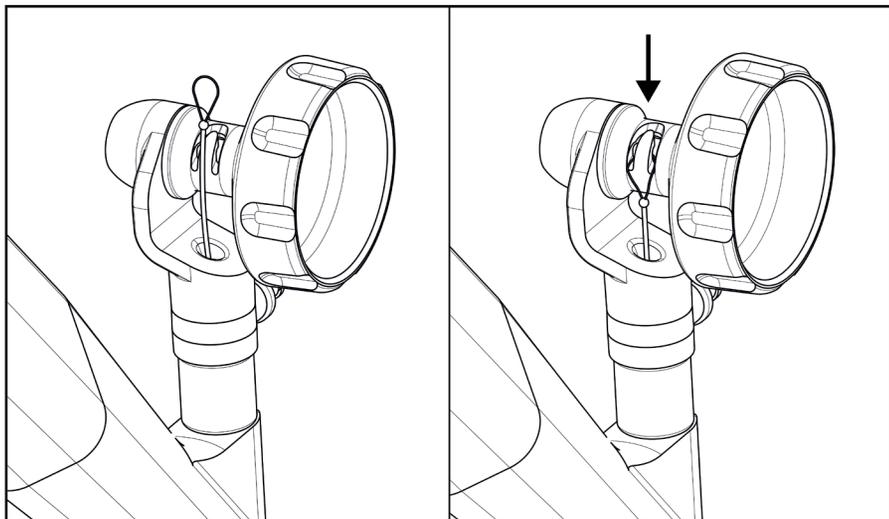

Шаг 5


Закрепите спусковой шнур на катушке для лигирования.

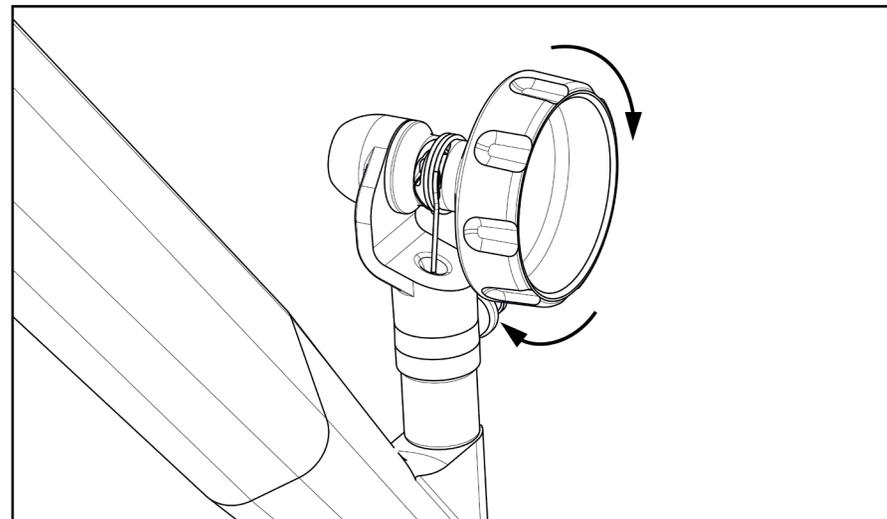


Шаг 6

Закрепив шнур на катушке, медленно поверните ручку, чтобы убрать излишки шнура. **Важно:** Слишком большое натяжение шнура может привести к соскакиванию фиксирующего кольца.

- Вращайте цилиндр, чтобы обеспечить подходящий обзор и изменять положение нити. **Важно:** Оптимизируйте эндоскопическую картину каждый раз при установке кольца.
- Смажьте эндоскоп и наружную поверхность цилиндра. **Внимание:** Не смазывайте внутреннюю поверхность цилиндра. **Внимание:** Не используйте алкоголь.

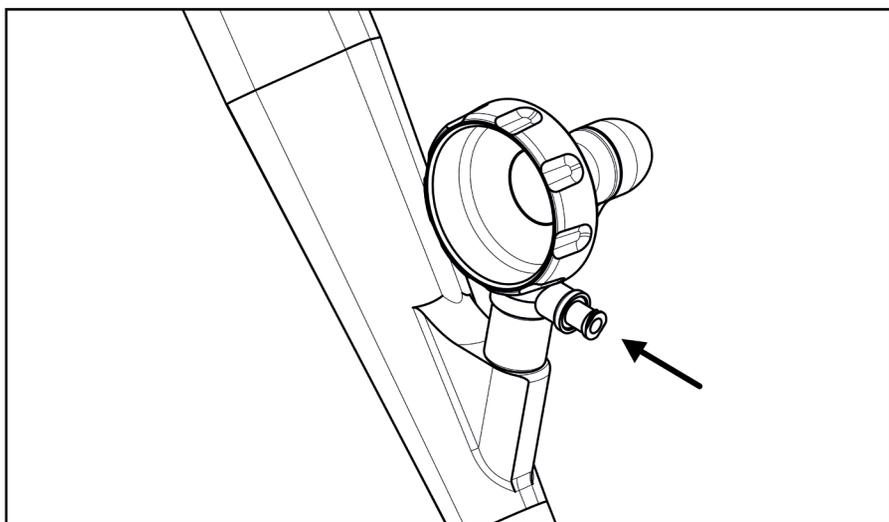

Важно: При необходимости промывания для прояснения эндоскопической картины, установите соединительную трубку в предназначенный для этого канал и впрысните стерильную воду.

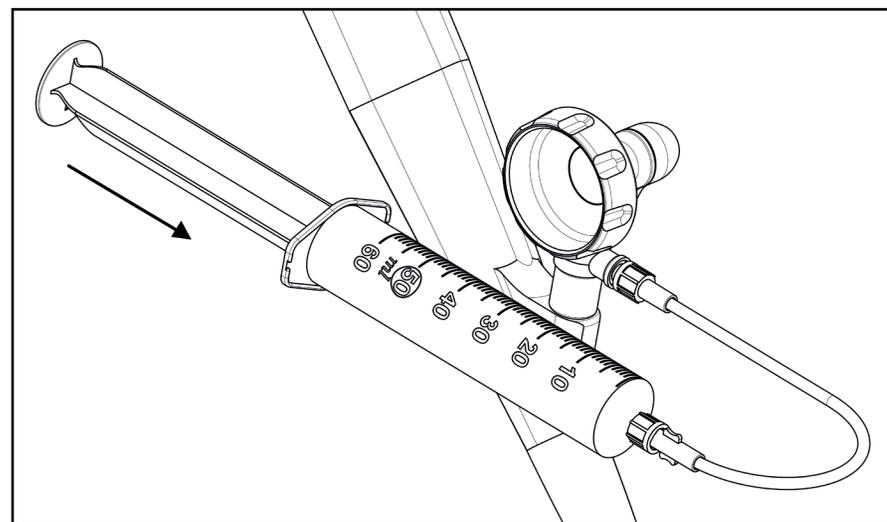

Устройство собрано и готово к использованию.